

# Wie wird die Unistik® 2-Stechhilfe verwendet?

## 1. Drücken



Drücken Sie die Lanzette in das Gehäuse der Unistik 2 Sicherheitslanzette, bis ein Klicken zu hören ist.

## 2. Drehen



Drehen Sie den Lanzettenverschluss ab, bis er vom Gerät getrennt ist (nicht ziehen, nur drehen). Entsorgen Sie den Verschluss in einem dafür geeigneten Behälter.

## 3. Probenentnahme



Wählen Sie einen Entnahmeort am Finger, bzw. wählen Sie bei neugeborenen Kindern einen Entnahmeort an der Ferse entsprechend der schattierten Bereiche der Bilder A und B. Drücken Sie die Unistik 2-Stechhilfe gegen den Entnahmeort und betätigen Sie den Auslöseknopf.

Massieren Sie im Bedarfsfall den Entnahmeort. Achten Sie aber darauf, an der Stelle selbst nicht zu viel Druck auszuüben.

Die Einweg-Nadel zieht sich nach der Penetration unmittelbar zurück und ermöglicht so die sichere direkte Entsorgung. Verwenden Sie einen geeigneten Behälter für scharfe Gegenstände.