




Einfach, schnell und sicher

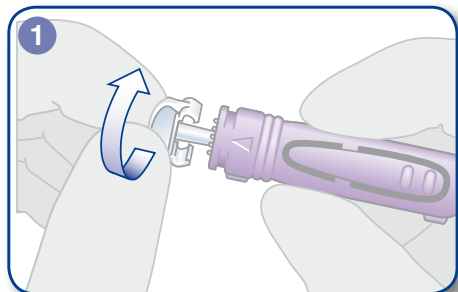

Die Unistik 3 an beiden Seiten halten und die Schutzkappe um 360° drehen, dann abziehen.

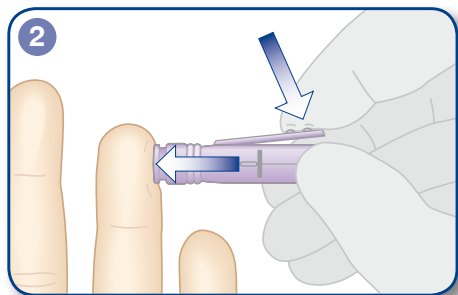

Die Lanzetten-Vorderseite gegen die gewählte Blutentnahmestelle drücken und seitlichen Auslöseknopf betätigen.

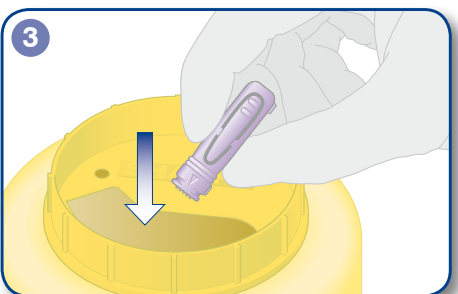

Gebrauchte Lanzette in hierfür vorgesehene Behälter **entsorgen**.

i



Entnahmestellen


Wählen Sie aus den blau schraffierten Bereichen in Bild A oder B Ihre Blutentnahmestelle.



Klinischer Beweis²

Verschiedene Lanzetten wurden an Patienten getestet und zeigten, dass die **Comfort Zone Technology®** (CZT®) den während einer Blutentnahme empfundenen Schmerz im Vergleich zu Lanzetten ohne CZT® erheblich verringert.

Maximaler Schmerzspiegel im Vergleich: Unistik® 3 mit und ohne CZT®

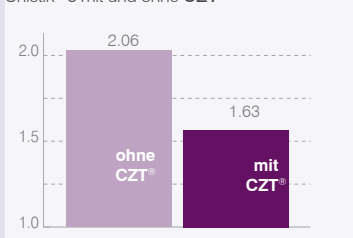











2. Dewland P, Edwards C. A single-blind, randomised, 8-way crossover study to compare the blood volume and pain perception of capillary blood sampling – March 2007.

Ein Grund zu lächeln



Unistik® 3 Varianten

Lanzette	Typische Blutmenge	Gauge	Eindringtiefe	Typische Anwendung
Unistik® 3 Gentle 		30G (0,32mm)	1,5mm	Pädiatrie und alle Kapillarblutuntersuchungen, für die eine sehr geringe Blutmenge ausreicht.
		PZN: 09313019 (100 Stk./Box)		Art. Nr.: 9313019
Unistik® 3 Comfort 		28G (0,38mm)	1,8mm	Pädiatrie, Geriatrie und alle Kapillarblutuntersuchungen, für die eine geringe Blutmenge ausreicht.
		PZN: 03802421 (100 Stk./Box)		Art. Nr.: 3802421
Unistik® 3 Normal 		23G (0,66mm)	1,8mm	Für Tests, die moderate Blutmengen benötigen, z. B. Glukose, Cholesterin, HbA1c.
		PZN: 03802409 (100 Stk./Box)		Art. Nr.: 3802409
Unistik® 3 Extra 		21G (0,81mm)	2,0mm	Für Tests, die größere Blutmengen benötigen.
		PZN: 03802444 (100 Stk./Box)		Art. Nr.: 3802444
Unistik® 3 Neonatal & Laboratory 		18G (1,20mm)	1,8mm	Speziell für die Fersenblutgewinnung bei Säuglingen und im Laborbereich für Blutgasanalysen.
		PZN: 03802438 (100 Stk./Box)		Art. Nr.: 3802438

AT11042-TOMCCLE0616/GER



STERILE

