

# AutoSqueeze™

OP6100


## Instructions Mode d'emploi Instrucciones de uso Gebrauchsanleitung

Making bottle squeezing easier. Clips onto eyedrop bottles to provide extra leverage.

Facilite l'utilisation des flacons. Clips pour flacons de collyre assurant une pression maximum.

Facilita el uso de los contenedores. Se ajusta al contenedor para proporcionar más presión.

Vereinfacht das Verabreichen von Augentropfen. Eintropfhilfe zum Aufstecken auf Augentropfenflaschen zur Unterstützung der Dosierung.

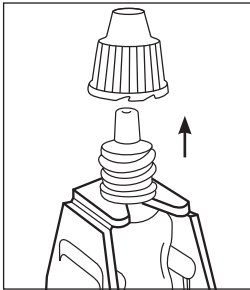

1. Remove cap from eye drop bottle.

Enlever le capuchon du flacon de collyre.

Retirar el tapón del frasco de las gotas.


Drehen Sie den Verschluss der Augentropfenflasche ab.

2. Locate the keyhole slot around the base of the bottle neck.

Positioner l'ouverture autour de la base du flacon.

Situar la ranura alrededor de la base del cuello del frasco.

Stecken Sie den Flaschenhalter unterhalb des Gewindes, über den Hals der Flasche.

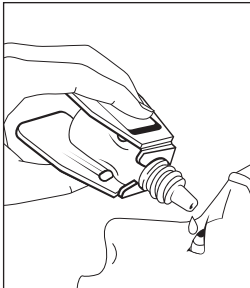


3. Position the bottle nozzle over the eye and gently squeeze.

Positionner l'embout du flacon au-dessus de l'œil et presser délicatement.

Coloque la boquilla del frasco sobre el ojo y presione el frasco ligeramente.

Halten Sie die Öffnung der Augentropfenflasche über das Auge und drücken Sie die Flügel vom AutoSqueeze ganz leicht zusammen.

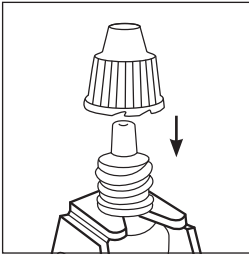


4. Replace cap on eye drop bottle.

Remettre le capuchon sur le flacon.

Tapar de nuevo el frasco.

Die Augentropfenflasche mit dem Verschluss verschließen.

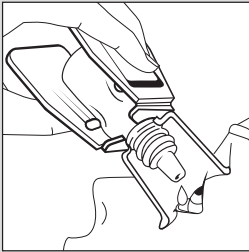

AutoSqueeze can also be used in conjunction with AutoDrop.

AutoSqueeze peut également être utilisé avec AutoDrop.

AutoSqueeze puede utilizarse conjuntamente con AutoDrop.

AutoSqueeze kann auch zusammen mit dem AutoDrop verwendet werden.

AutoSqueeze™ and AutoDrop® are trademarks of Owen Mumford Ltd

Made in England by



[www.owenmumford.com](http://www.owenmumford.com)



**HEAD OFFICE  
INTERNATIONAL SALES &  
MARKETING**

Owen Mumford Ltd  
Brook Hill, Woodstock  
Oxfordshire OX20 1TU,  
United Kingdom  
T : 01993 812021  
F : 01993 813466  
E : [info@owenmumford.co.uk](mailto:info@owenmumford.co.uk)

**UK / IRELAND SALES &  
MARKETING**

Owen Mumford Ltd  
Primsdown Ind. Estate  
Worcester Road, Chipping Norton  
Oxfordshire OX7 5XP  
United Kingdom  
T : 01608 645555  
F : 01608 646546  
E : [info@owenmumford.co.uk](mailto:info@owenmumford.co.uk)

**NORTH AMERICA**

Owen Mumford Inc.  
1755 West Oak Commons Court  
Marietta, Georgia 30062, USA  
T : 800-421-6936  
F : 770-977-2866  
E : [info@owenmumfordinc.com](mailto:info@owenmumfordinc.com)

**FRANCE**

Owen Mumford  
BP 3333 27950  
Saint Marcel  
France  
T : 02 32 51 88 70  
F : 02 32 21 96 95  
E : [contact@owenmumford-fr.com](mailto:contact@owenmumford-fr.com)

**GERMANY**

Owen Mumford GmbH.  
Alte Häge 1 63762  
Großostheim-Ringheim  
Germany  
T : 06026/97750  
F : 06026/977529  
E : [info@owen-mumford.de](mailto:info@owen-mumford.de)

OP/6100/11/0000/03