



Unistik® 3 *Gentle*

DISPONIBLE SUR ORDONNANCE

Nouveau

Calibre : 30G
Profondeur : 1.5 mm
Marges de volume sanguin :
3µL – 15µL

ACL: 34010 2032116 3

Types de test recommandés :
contrôle de la glycémie, HbA1c.

Domaines d'applications recommandés :
centre de soins diabète, pédiatrie, à domicile.

Boîte de 100 : AT1022
Boîte de 200 : AT1024



Unistik® 3 *Comfort*

DISPONIBLE SUR ORDONNANCE

Calibre : 28G
Profondeur : 1.8 mm
Marges de volume sanguin :
5µL – 30µL

ACL : 34010 4407916 3

Types de test recommandés :
contrôle de la glycémie, HbA1c.

Domaines d'applications recommandés :
centre de soins diabète, pédiatrie, gériatrie, à domicile.

Boîte de 100 : AT1042
Boîte de 200 : AT1044



Unistik® 3 *Normal*

DISPONIBLE SUR ORDONNANCE

Calibre : 23G
Profondeur : 1.8 mm
Marges de volume sanguin :
30µL – 75µL

ACL : 34010 4407891 3

Types de test recommandés :
cholestérol, contrôle de la glycémie, HbA1c.

Domaines d'applications recommandés :
gériatrie, à domicile, centres de transfusion sanguine.

Boîte de 100 : AT1002
Boîte de 200 : AT1004



Unistik® 3 *Extra*

Calibre : 21G
Profondeur : 2.0 mm
Marges de volume sanguin :
75µL – 125µL

Boîte de 100 : AT1012
Boîte de 200 : AT1014

Types de test recommandés :
cholestérol, hémoglobine,
kits de test de diagnostic.

Domaines d'applications recommandés :
adultes à peaux très épaisses, centres de transfusion sanguine.



Unistik® 3 *Neonatal & Laboratory*

Calibre : 18G
Profondeur : 1.8 mm
Marges de volume sanguin :
200µL+

Boîte de 100 : AT1052
Boîte de 200: AT1054

Tests au talon du nouveau-né

Types de test recommandés :
phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale,
bilirubine, glucose, hémoglobine,
drépanocytose et autres maladies.

Domaines d'applications recommandés :
tests au talon des nouveaux-nés.

Laboratoire – Test au doigt

Types de test recommandés : gaz de sang, électrolyte,
H. pylori, numération formule sanguine NFS.





Mode d'emploi **Unistik® 3**

Simple, rapide et sûr



Tenez l'autopiqueur par les côtés et cassez la protection en **la tournant sans tirer**.



Pressez l'embase fermement sur l'extérieur du doigt et appuyez sur le déclencheur.



Massez le site de ponction en prenant soin de ne pas presser trop fort.



Éliminez l'autopiqueur dans un collecteur de déchets adapté.

