


Unifine[®] Plus


Une aiguille et un désadaptateur tout-en-un

Utiliser **Unifine[®] Plus** est très simple,
il n'y a que deux étapes.

- 1 Retirez l'opercule en papier, vissez l'aiguille **NEUVE** et retirez le petit capuchon.

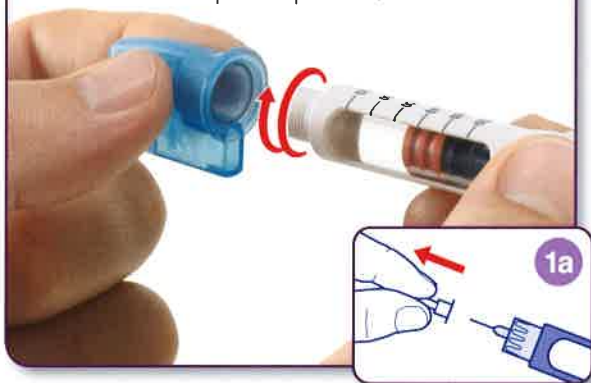

Injectez la dose nécessaire en respectant les techniques d'injection appropriées.

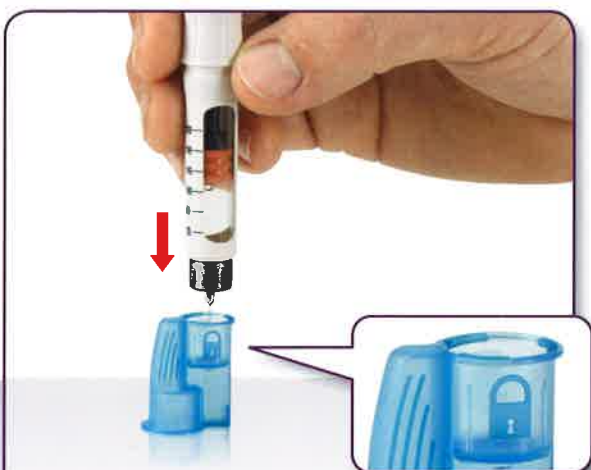

- 2 Après l'injection, poussez l'aiguille **USAGÉE** dans le conteneur de retrait (côté cadenas) jusqu'à entendre un clic de sécurité. Dévissez l'aiguille du stylo et jetez-la dans un collecteur adapté.



with
Safety-Click
Technology™

Posez le conteneur de retrait sur une surface plane, pour désadapter en sécurité l'aiguille usagée d'une seule main.