

# LES ÉTAPES DE l'injection au stylo


**Innovation**  
La première aiguille\* avec désadaptateur intégré

Le désadaptateur intégré qui sert de collecteur intermédiaire

## INJECTION DE L'INSULINE



**1 Mains propres** et sites d'injection propres.

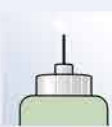

**5 Placer la nouvelle aiguille et purger de 2 unités le système,** pour vérifier la perméabilité de l'aiguille et garantir une diffusion de la dose totale. L'insuline doit perler au bout de l'aiguille.




**2 Palper le site d'injection** pour éviter :

- de piquer dans des bosses, creux ou indurations (qui sont des signes de lipodystrophies)

- dans des hématomes et régions douloureuses

- si présence de lipodystrophie, éviter d'injecter jusqu'à disparition complète de la bosse ou du creux.

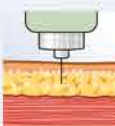

**6 Injecter l'insuline** en sous-cutané.



**7 Attendre 10 secondes** avant de retirer l'aiguille pour éviter toute fuite d'insuline et s'assurer de la délivrance totale de l'insuline.



**3 S'assurer que le piston du stylo a été abaissé jusqu'à ce que le sélecteur de dose revienne à 0.**



**8 Jeter l'aiguille** dans un collecteur prévu à cet effet.



**4 Si l'insuline est trouble :** remettre en suspension en agitant lentement de haut en bas, entre quinze et vingt fois.



[www.dastri.fr](http://www.dastri.fr)

Owen Mumford est adhérent DASTRI pour gérer les déchets de soins des patients en autotraitement.



**Unifine® Pentips® Plus**

**POUR plus DE LIBERTÉ !**



Accédez à une vidéo d'utilisation d'Unifine Pentips Plus

**Unifine® Pentips® Plus**



**1 INJECTION = 1 AIGUILLE**

Compatible\* tous stylos

5 longueurs d'aiguille disponibles en pharmacie  
4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 12 mm

\*Compatibilité avec les principales marques de stylos injecteurs d'insuline à la date du 01/10/13. Unifine® Pentips® est une marque déposée par Owen Mumford Ltd. Tous droits réservés.

Unifine® Pentips® Plus est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Owen Mumford et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié SGS. Il est destiné aux patients diabétiques insulino-dépendants dans le cadre de l'administration d'insuline. Il est destiné à l'auto-injection par les patients. Ce dispositif est composé d'une aiguille stérile et d'un désadaptateur intégré qui permet de loger l'aiguille usagée avant élimination. Lire attentivement le mode d'emploi. Pour le bon usage de ce dispositif, il est recommandé de bien vérifier que l'opercule soit intact pour garantir la stérilité de l'aiguille. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Pour toute question, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**OWEN MUMFORD**  
Making a World of Difference  
RCS EVREUX 381224823

FRANCE - Siège social  
5, rue de la Croix Blanche 27950 SAINT-MARCEL  
T : +33 (0)2 32 51 88 70  
F : +33 (0)2 32 21 96 95  
E : [contact@owenmumford-fr.com](mailto:contact@owenmumford-fr.com)

		BIEN AIGUILLÉ	
🕒	COMPTER JUSQU'À 10		
9	RECYCLER	♻️	

# ASTUCES POUR plus DE LIBERTÉ

⚙️	ÊTRE ACTIF		
	RESTER LIBRE	🏠	



**OWEN MUMFORD**

\* Brevet européen EP2015899 déposé LE 10/05/2007

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Création et réalisation TRANSTRIAS& CONSULTING & RP - Révision: Arcange Février 2016 - Impression: Média Graphic, Rennes

# 1

## JE CHANGE D'AIGUILLE À CHAQUE INJECTION




Je réduis le risque de douleur, d'apparition de lipodystrophie\*, d'obstruction de l'aiguille et de dosage inadéquat.

# 2

## JE FAIS UNE ROTATION DES POINTS D'INJECTION DANS DIFFÉRENTS SITES

pour une meilleure reproductibilité de l'action de mon insuline et pour éviter la lipodystrophie\*.

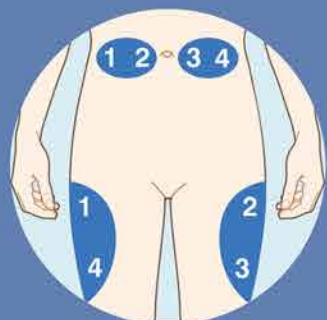

\* Lipodystrophie : bosses, indurations du tissu graisseux sous cutané.

# 3

## ABSORPTION DE L'INSULINE SUR LES DIFFÉRENTS SITES D'INJECTION

- ▶ **Abdomen** : absorption de l'insuline la plus rapide et la plus régulière.
  - Bras** : absorption moyenne.
  - Cuisses et fesses** : absorption plus lente.
- La réalisation de l'injection de l'insuline peut être faite par une tierce personne.




# 4

## JE COMPTE JUSQU'À 10 À LA FIN DE L'INJECTION AVANT DE RETIRER L'AIGUILLE



# 5

## POUR LES DIFFÉRENTS SITES, JE PEUX UTILISER :

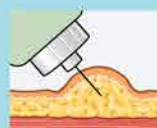

▶ Une aiguille longue (8 mm) en réalisant un pli à 45°



▶ Une aiguille courte (4,5 ou 6 mm) sans pli à 90°

# 6

## SI JE RÉALISE UN PLI



▶ Je soulève délicatement la peau et le tissu sous-cutané entre le pouce et l'index sans soulever la partie musculaire, afin d'éviter une résorption trop rapide de l'insuline et provoquer potentiellement un risque d'hypoglycémie.



# 7

## SI JE PRATIQUE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE OU SPORTIVE :



▶ **Attention**, j'évite de piquer le site en regard du muscle sollicité (je privilégie l'abdomen et j'en parle à mon médecin).

# 8

## J'ÉLIMINE MES AIGUILLES DANS UN COLLECTEUR RÉSERVÉ À CET USAGE

▶ Ce collecteur spécifique pour jeter les déchets tranchants piquants est délivré gratuitement par mon pharmacien sur présentation d'une ordonnance.

▶ Pour trouver le point de collecte le plus proche de votre domicile : [www.dastri.fr](http://www.dastri.fr)\* ou adressez-vous à votre mairie.



# 9

## JE N'ARRÊTE JAMAIS MES INJECTIONS D'INSULINE

MAIS JE DEMANDE CONSEIL À MON DIABÉTOLOGUE POUR SAVOIR COMMENT ADAPTER MES DOSES D'INSULINE EN CAS DE :

- ▶ Voyages, vacances
- ▶ Repas de fêtes, de famille
- ▶ Activités
- ▶ Maladie

\* DASTRI : éco-organisme chargé de la collecte et de l'élimination des déchets médicaux (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux)