


Auf Anhieb eine  
**große Blutmenge**  
entnehmen

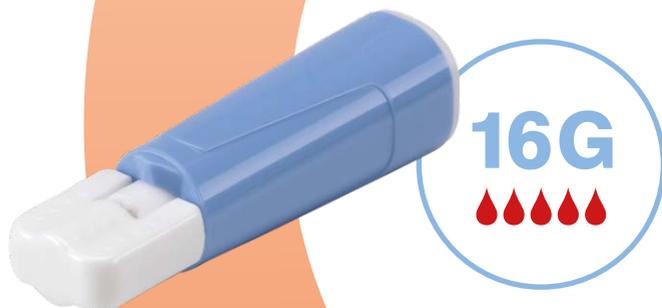

KONTAKT  
AKTIVIERUNG

# **Unistik® Touch**

Unistik® Touch 16G hilft Anwendern,  
hohe Blutvolumen zu erhalten  
und präanalytische Fehler bei  
multiplexen Assays zu minimieren.



**Für eine große Blutmenge  
mit nur 1x stechen**



- ✓ Einfach in der Handhabung
- ✓ Für Laien geeignet
- ✓ Klein – Ideal für Test-Kits
- ✓ Versand auch als Bulk-Ware

# Für eine reibungslose Blutentnahme

**Unistik® Touch** wurde für eine besonders einfache Kapillarblutentnahme entwickelt. Die Kontaktaktivierung der Sicherheitslanzette wird automatisch bei Druck gegen die Einstichstelle ausgelöst. Nach dem Auslösen wird die Punktionsklinge in das Gehäuse zurückgezogen, wodurch das Risiko einer Wiederverwendung, Kreuzinfektion und Nadelstichverletzung gesenkt wird.

## Maximaler Komfort

Die einzigartigen Erhebungen der **Comfort Zone Technology®** maskieren den Schmerzreiz und sorgen für eine signifikante Schmerzlinderung<sup>1</sup>.

## Chargennummer auf jeder Lanzette

Bietet Ihnen Sicherheit durch die Rückverfolgbarkeit des Produkts.



## Kontaktaktivierung


One-Touch-Aktivierung für eine einfache Handhabung.

## Klinge (16G)


Die versteckte 16G-Punktionsklinge hat einen Durchmesser von 1,5 mm und eine Punktionstiefe von 2,0 mm, wodurch ein höheres Blutvolumen zum Testen gewonnen wird.

## Comfort Zone Technology®


Wenn die Lanzette auf die Einstichstelle gedrückt wird, bewirken acht punktförmige Erhebungen eine Stimulation der Nervenenden, die die Einstichstelle umgeben. Diese senden daraufhin ein Signal an das Gehirn, welches den Schmerz durch den Einstich maskiert, damit dieser als weniger schmerzhaft wahrgenommen wird. Dadurch wird das Schmerzempfinden bei der Blutentnahme am Finger minimiert.<sup>1,2</sup>

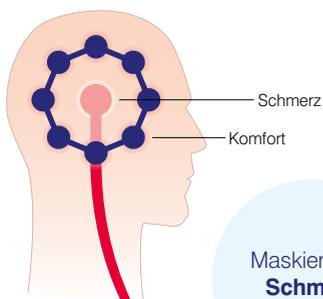


Maskiert den  
**Schmerz**

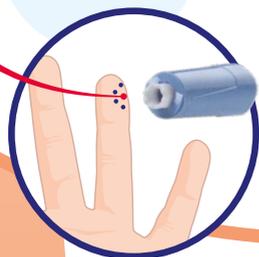


## Anwendung von Unistik® Touch – so einfach wie das ABC

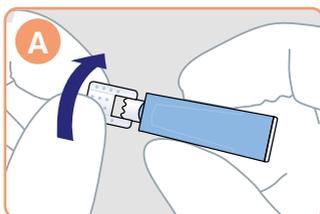

Schutzkappe der Lanzette **ABDREHEN** und entsorgen. NICHT ZIEHEN.

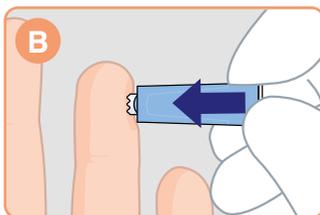

**KLICK.** Sicherheitslanzette fest auf die Entnahmestelle drücken. Nach dem Auslösen wird die Lanzette automatisch in das Gehäuse zurückgezogen.

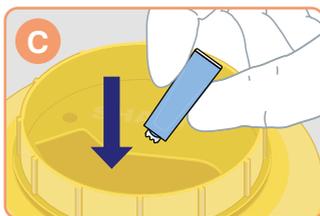

Die benutzte **Unistik® Touch** in einem geeigneten Sicherheitsbehälter für scharfe und spitze Gegenstände **ENTSORGEN.**

# Für Hersteller: Warum eine Partnerschaft mit Owen Mumford?

Owen Mumford ist seit über 35 Jahren führend in Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten zur Kapillarblutentnahme, die für Point-of-Care-Tests und in Laboren verwendet werden.

Wir bieten hochwertige Sicherheitsprodukte und Serviceleistungen an und sind u. a. nach folgenden Standards zertifiziert:

- ISO13485 Zertifizierung
- Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC
- Medizinprodukteverordnung (MDR)
- Umweltmanagementsysteme ISO 14001

Wir verstehen uns als Servicepartner und stellen eine breite Palette von Produkt- und

Verpackungskonfigurationen bereit, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen – sowohl für den Bereich Point-of-Care-Testing als auch für Schnelltest-Kits.

Sprechen Sie uns an!

T: +49 (0)6026-97750

E: [de.info@owenmumford.com](mailto:de.info@owenmumford.com)



## Wir unterstützen Anwender darin, einfach und sicher Blutproben zu nehmen und zuverlässige Testergebnisse zu erzielen

Wir haben Schulungsmaterialien entwickelt, um präanalytische Fehler zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Testergebnisse zu unterstützen.

**Unistik® Touch 16G ist Teil eines größeren Produktportfolios mit unterschiedlichen Varianten und Lanzettenstärken.**

**Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Lanzette für Ihre Testanforderungen.**

# Unistik® Touch

Erhältlich in vier Varianten, für jeden Test die richtige Lanzette.

	<b>Unistik® Touch</b>	<b>28G</b> 1,8 mm 🔴🔴	Häufige Blutzuckermessungen und andere Tests, z. B. Cholesterin, Hämoglobin und Lateral-Flow-Tests	100 Stk./Box PZN 12482091
	<b>Unistik® Touch</b>	<b>23G</b> 2,0 mm 🔴🔴🔴	Blutzuckertests und Tests, die größere Blutmengen erfordern, z. B. Gerinnung, Leberfunktionstest, Cholesterin, Hämoglobin und Lateral-Flow-Tests	100 Stk./Box PZN 12482116
	<b>Unistik® Touch</b>	<b>21G</b> 2,0 mm 🔴🔴🔴	Tests, die große Blutmengen erfordern, z. B. kardiale Marker, Gerinnung, Blutgase oder Lateral-Flow-Tests für die sexuelle Gesundheit	100 Stk./Box PZN 12482145
	<b>Unistik® Touch</b>	<b>16G</b> ( $\sigma$ 1.5 mm) 2,0 mm 🔴🔴🔴🔴	Tests, die sehr große Blutmengen mit mehr als 200 $\mu$ l erfordern, z. B. Multiomarker-Tests, Blutproben für Blutentnahmeröhren, Trockenblutkarten	100 Stk./Box PZN 16623401

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.owenmumford.com/de](http://www.owenmumford.com/de)

Wir sind unter anderem nach folgenden Standards zertifiziert:

- Zertifizierung nach ISO 13485
- Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
- CMDCAS 13485 (kanadische Gesundheitsbehörde)
- Umweltmanagementsysteme ISO 14001



1. Dewland P and Edwards C. A single-blind, randomised, 3-way crossover study to compare the blood volume and pain perception of capillary blood sampling, 2007; UK. 2. Melzack R. and Wall P The Challenge of Pain. England (1982): Penguin Books.