


Unistik® TinyTouch™ ermöglicht Ihnen die Wahl einer Sicherheitslanzette sowohl speziell für Frühgeborene als auch für Neugeborene, wodurch Sie auf Anrieb sicher die richtige Blutmenge entnehmen können.


	Unistik TinyTouch Full Term	Tiefe 1,00 mm	Länge 2,50 mm	50 Stück pro Box PZN: 07521185
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

	Unistik TinyTouch Preemie	Tiefe 0,85 mm	Länge 1,75 mm	50 Stück pro Box PZN: 07521191
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------------------------



**FERSEN-
BLUTENTNAHME**

Sample right
first time

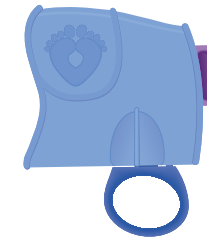

Unistik® TinyTouch™

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.owen-mumford.de

Wir sind unter anderem nach folgenden Standards zertifiziert:

- Zertifizierung nach ISO 13485
- Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
- CMDCAS 13485 (kanadische Gesundheitsbehörde)
- Umweltmanagementsysteme ISO 14001



1. Shah V. et al. Evaluation of a New Lancet Device (BD Quikheel) on Pain Response and Success of Procedure in Term Neonates (Bewertung einer neuen Lanzette (BD Quikheel) in Bezug auf Schmerzreaktion und Verfahrenserfolg bei Neugeborenen). Arch Pediatr Adolesc Med, 2003; 157: 1075-1078.

© Copyright Owen Mumford 2017
UTT-RANGE-DE-A5-LTMCC/117/01

Unistik® TinyTouch™

Für eine schmerzarme Blutentnahme bei Säuglingen¹

Die Kapillarblutentnahme bei Neugeborenen birgt eigene Herausforderungen. Zu den obersten Prioritäten zählen, eine möglichst schmerzarme Blutabnahme beim Säugling sicherzustellen, mit einem einzigen Einschnitt eine geeignete Blutmenge zu sammeln und dies bei absoluter Sterilität des Instruments.


Unistik® TinyTouch™ ist eine Sicherheitsinzisionslanzette für die Fersenblutentnahme, welche entwickelt wurde, um sich genau diesen Herausforderungen zu stellen. Mit der klar sichtbaren Positionierhilfe können Sie die Lanzette präzise positionieren, um einen schnellen, einfachen und bestmöglichen Eingriff vorzunehmen. Der leicht zu greifende und schnell zu lösende sterile Verschluss ermöglicht es, die Klinge steril zu halten, und reduziert die für eine Verwendung notwendigen Schritte. Die manuelle Aktivierung ermöglicht es Ihnen, das Instrument kontrolliert auszulösen, und auf Anrieb die richtige Blutmenge zu entnehmen.

Manueller Auslöseknopf*

Für eine einfache Aktivierung.

Positionierhilfe

Für eine präzise Positionierung der Lanzette.

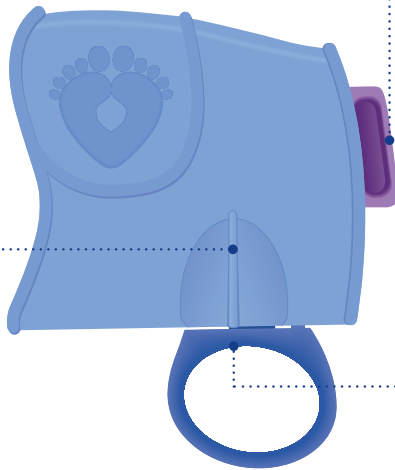


Sterile Klinge

Sicher unter einer sterilen Lanzettenabdeckung verwahrt, um die vollkommene Sterilität des Instruments sicherzustellen, bis die Verschlusslasche entfernt wird.


*Der manuelle Auslöseknopf bleibt nach der Verwendung gedrückt und die Klinge zieht sich zurück, wodurch das Risiko einer Wiederverwendung, Kreuzinfektion oder Nadelstichverletzung verringert wird.

Erreicht nur die oberflächlichen Blutgefäße

Unistik® TinyTouch™ wurde so entwickelt, dass nur die oberflächlichen Blutgefäße erreicht werden, ohne bis zu den tiefer liegenden dermalen Schmerzfasern vorzudringen. Die Lanzette verfügt über eine Schneide- anstelle einer Punktionsklinge, mit einer Einstichtiefe von 0,85 mm für Frühgeborene und 1 mm für Neugeborene. Diese Lanzetten-Variante minimiert die Schmerzen des Säuglings¹ bei der Blutentnahme, erleichtert der Familie den Vorgang und bedeutet weniger Stress für Sie.

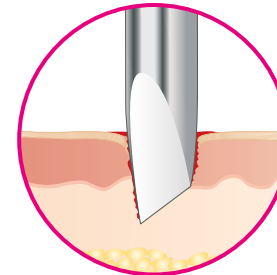


Punktionsklinge

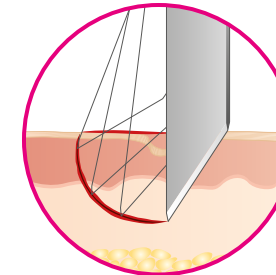


Schneideklinge


Anwendung der Unistik® TinyTouch™ – so einfach wie das ABC

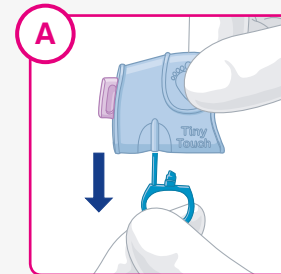

Die sterile Verschlusslasche gerade **ABZIEHEN**.

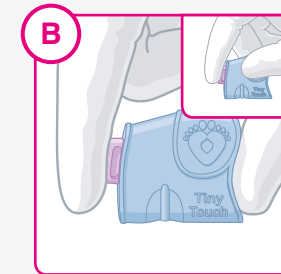

Das Produkt kann auf zwei Arten gehalten werden. Am besten ist es, wenn Daumen und Zeigefinger die **BREITERE SEITE FASSEN**. Alternativ kann der Daumen an der schmalen Seite aufgelegt werden.

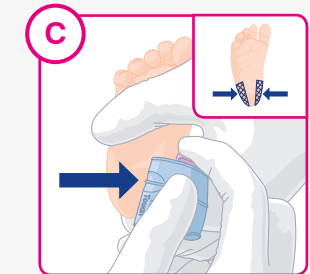

Unter Verwendung der Positionierhilfe die Seite mit der Klinge auf die Inzisionsstelle richten und anschließend den Auslöseknopf **DRÜCKEN**. Die Klinge zieht sich nach Gebrauch automatisch zurück. In geeignetem Sicherheitsbehälter für scharfe und spitze Gegenstände entsorgen. Leicht ober- und unterhalb des Einschnitts massieren, um Blut austreten zu lassen.